



Bedieneinheit

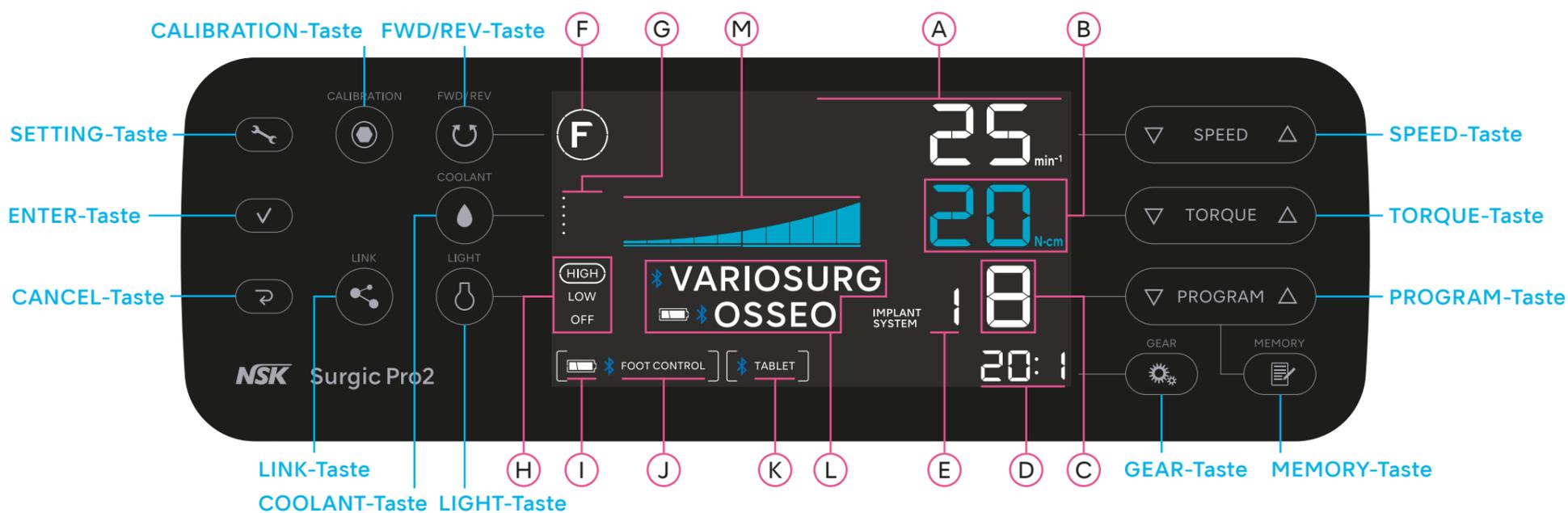


Fußsteuerung

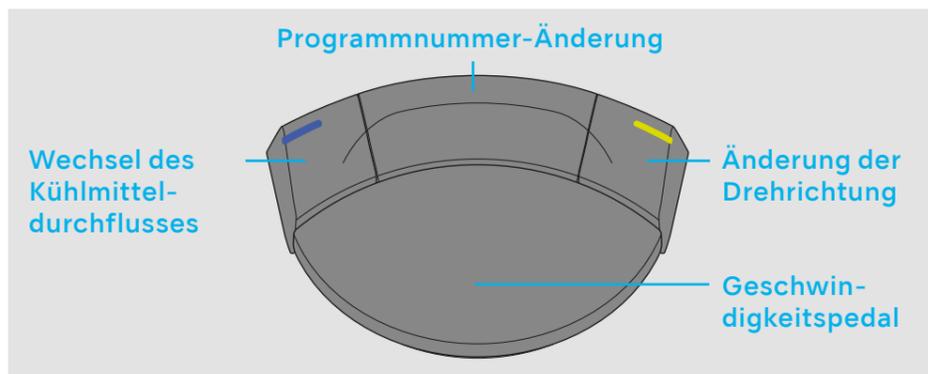


A	Geschwindigkeit	I	Batteriestand der Fußsteuerung
B	Drehmoment	J	Verbindungsstatus der Fußsteuerung
C	Programmwahl	K	Verbindungsstatus zwischen einem externen Anschluss und der Bedieneinheit
D	Übersetzungsverhältnis	L	Verbindungsstatus zwischen VarioSurg 3 and Osseo 100+
E	Implantsystem wählen	M	Aktuelles Betriebsdrehmoment
F	Drehrichtung		
G	Kühlmitteldurchfluss		
H	Lichtintensität		

Vor Inbetriebnahme des Geräts

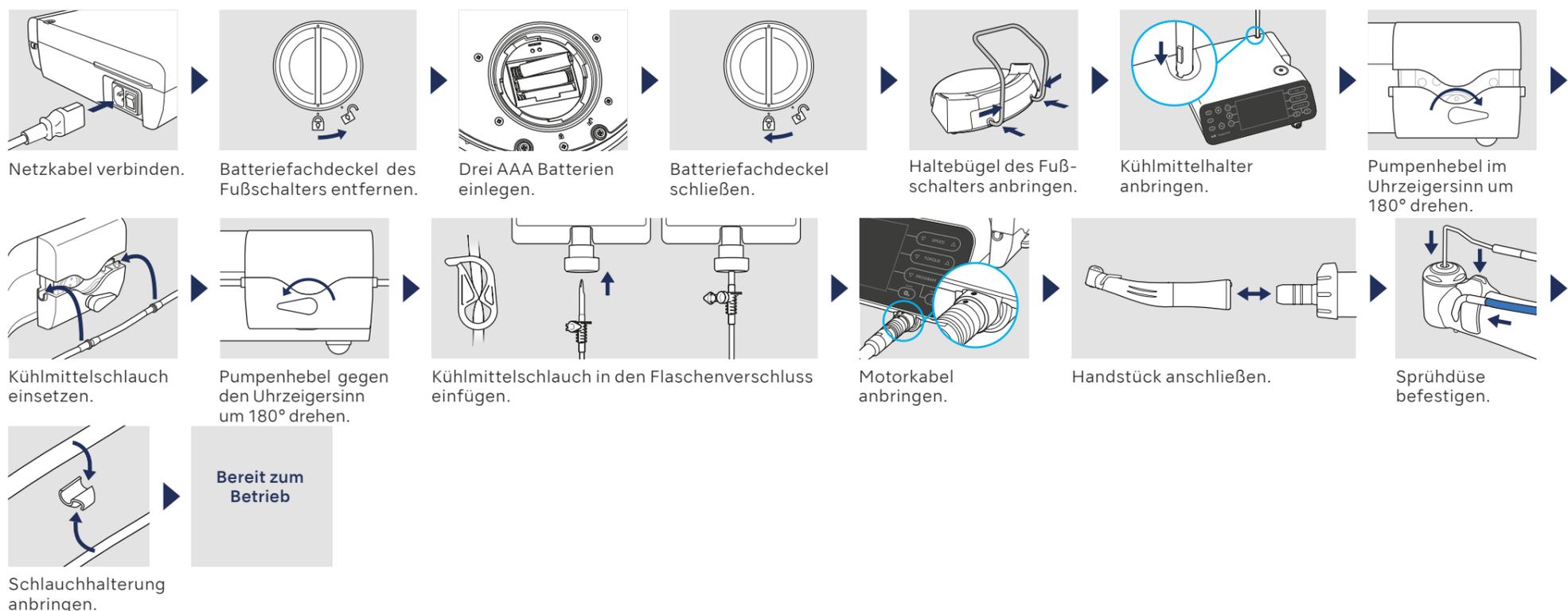

Betriebsstart

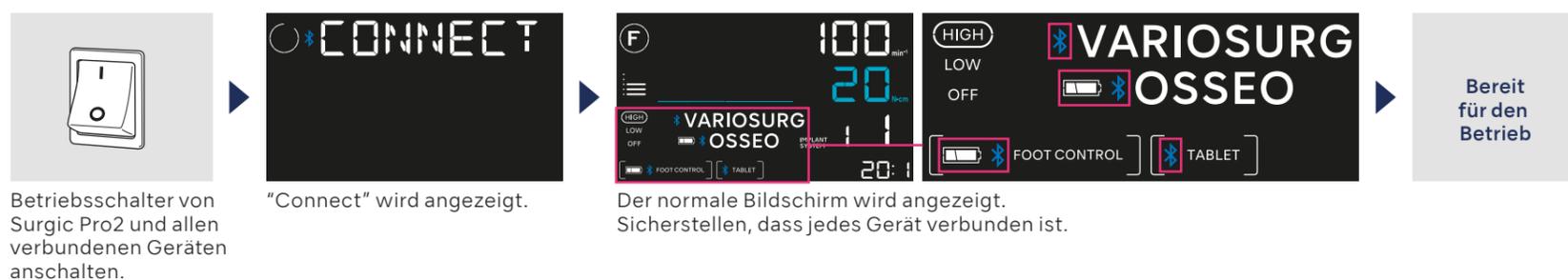

Die ersten Schritte (Verbinden der Geräte)

1
Min. 2 Sek.

SETTING-Taste drücken und halten. "BLE SET" wird angezeigt.


2


ENTER-Taste drücken.

3

TORQUE-Taste drücken, um das entsprechende Gerät auszuwählen. HINWEIS: Die Worte auf dem Bildschirm (außer "BLE SET" und "PAIRING") blinken.

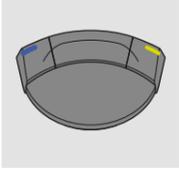

Fußsteuerung
 

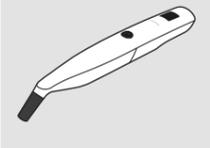
Osseo 100+
 

VarioSurg3
  


Externer Anschluss
 

ENTER-Taste drücken.

▼ Fußsteuerung

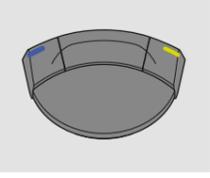

Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn Surgic Pro2 nach dem Kauf das erste Mal verwendet wird. Wenn die Fußsteuerung nicht gekoppelt ist oder wenn Sie eine andere Fußsteuerung neu erworben haben, führen Sie den folgenden Vorgang durch. HINWEIS: Die Kopplung kann 10 Minuten nach Einlegen der Batterien erfolgen.

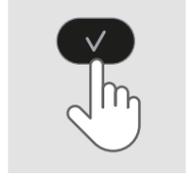

ENTER-Taste drücken.

Etwa 10 Sek.


Linke und rechte Taste sowie das Pedal gleichzeitig gedrückt halten.


Verbunden


Die Kontrolleinheit erzeugt einen Signalton und "OK" wird angezeigt. Die Verbindung war erfolgreich. Sicherstellen, dass das Gerät verbunden ist.

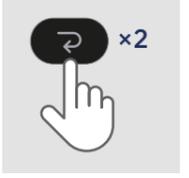
CANCEL-Taste drücken, um in die normale Ansicht zurückzukehren.

▼ Osseo 100+




Power ON

Betriebstaste drücken, um das Gerät einzuschalten.



Min. 3 Sek.

Betriebstaste gedrückt halten.


"PA" wird angezeigt.



Verbunden


Die Kontrolleinheit erzeugt einen Signalton und "OK" wird angezeigt. Die Verbindung war erfolgreich. Sicherstellen, dass das Gerät verbunden ist.

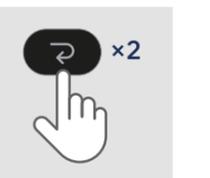

CANCEL-Taste drücken, um in die normale Ansicht zurückzukehren.

▼ VarioSurg3

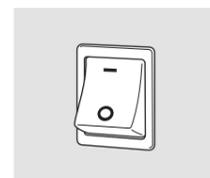



Betriebsschalter anschalten. Vorher das Verbindungskabel anschließen.



Taste gedrückt halten.

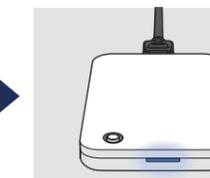
Wenn die LED blau leuchtet, Taste loslassen.


Verbunden


Die Kontrolleinheit erzeugt einen Signalton und "OK" wird angezeigt. Die Verbindung war erfolgreich. Sicherstellen, dass das Gerät verbunden ist. Die LED des Link-Moduls wechselt auf grün.

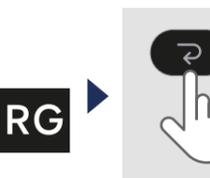
CANCEL-Taste drücken, um in die normale Ansicht zurückzukehren.

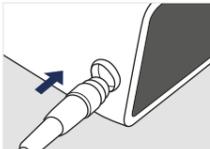


▼ Externen Anschluss (z.B. iPad) verbinden




App starten.

Die App über den folgenden Link vorher installieren.

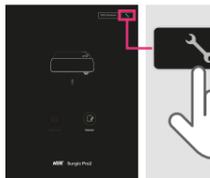

Symbol drücken.


"Start" wählen.


Den Code "123456" eingeben und "Pair" wählen.


Verbunden


Die Kontrolleinheit erzeugt einen Signalton und "OK" wird angezeigt. Die Verbindung war erfolgreich. Sicherstellen, dass das Gerät verbunden ist.

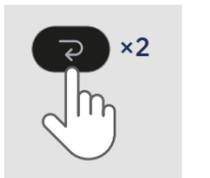
CANCEL-Taste drücken, um in die normale Ansicht zurückzukehren.



www.nsk-dental.com/qr/app-surgicpro2