

NSK SCHNELLANLEITUNG für Varios Combi Pro2

Bedienfeld

Einstellen der Spülung

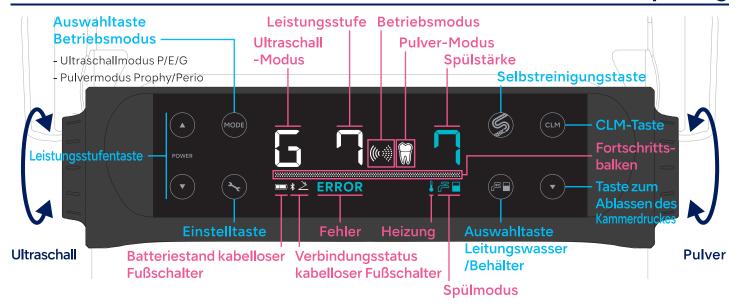

Fußschalter

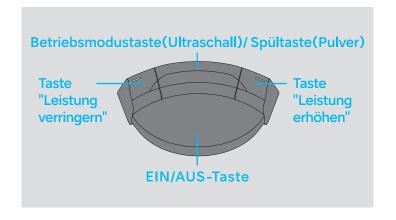


Verwendung des Ultraschall-Modus

1 Halten Sie das Ultraschallhandstück. 2 Wählen Sie den Ultraschallmodus (P/E/G). 3 Stellen Sie die Leistungsstufe ein. 4 Wählen Sie die Spülmethode. 5 Stellen Sie die Spülstärke ein. 6 Betätigen Sie die EIN/AUS-Taste.



Verwendung des Pulvermodus

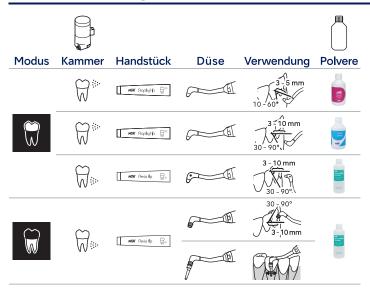

- 1 Halten Sie das Pulverhandstück. 2 Wählen Sie den Pulvermodus (Prophy 🔐 / Perio 😭). 3 Stellen Sie die Leistungsstufe ein.
- 4 Stellen Sie die Spülstärke ein. 5 Betätigen Sie die EIN/AUS-Taste.





Selbstreinigung(Auto-Cleaning)

	Häufigkeit der Durchführung	Ist-Nutzung des Varios Combi Pro2		
		Ultraschall und Pulver	nur Pulver	nur Ultraschall
Erforderlicher Auto-Cleaning Modus	Nach jd. Behandlung	W (Pulver)	W (Pulver)	_
	1x täglich (nach d.letzten Behandlung)	D	Р	W (Ultraschall)

- W (Ultraschall-Seite): Entfernung von Wasser
- **W** (Pulver-Seite): Entfernung von Wasser und Ausblasen von Pulver
- P: Entfernen von Wasser aus dem Handstückschlauch Entfernung von Pulver aus dem Pulverkreislauf Ablassen des Kammerdrucks
- D: Entfernen von Wasser aus dem Handstückkabel/-schlauch Entfernung von Pulver aus dem Pulverkreislauf Ablassen des Kammerdrucks







Stellen Sie die Spülstärke auf 10.

Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis "AC" angezeigt wird.











Wählen Sie "W".

Stecken Sie das Handstück mit Kabel oder Schlauch in die CLM-Halterung. Tippen Sie .

Nachdem "Fin" angezeigt wird, drücken Sie 🚳.











Entsorgen Sie das Pulver und setzen Sie die Kammer ein.

Wählen Sie "D" oder "P".

Stecken Sie die Handstücke mit Kabel /Schlauch in die CLM-Halterung. Drücken Sie .

Nachdem "Fin" angezeigt wird, drücken Sie .


Dekontamination / Verhinderung von Biofilmbildung (CLM-Modus)



Befüllen Sie den CLM-Behälter mit b.clean (unverdünnt).



Setzen Sie den CLM-Behälter ein.

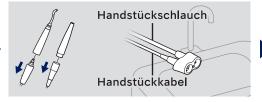

Entfernen Sie das Handstückkabel/-schlauch von iedem Handstück und setzen Sie diese in die CLM-Halterung ein.




Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis die obige Anzeige erscheint.



Betätigen Sie 3 Sekunden lang, bis der CLM-Modus startet.




Nachdem die obige Anzeige erscheint, schalten Sie das Gerät aus und warten Sie 12 Stunden oder länger.

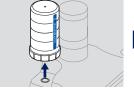

Schalten Sie den Strom ein. Nehmen Sie den CLM-Behälterab.



Füllen Sie den desinfizierten Spülbehälter mit Trinkwasser.

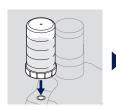

Setzen Sie den Spülbehälter ein.



Betätigen Sie @ 3 Sekunden lang, bis die Entleerung beginnt.

IRA 🛊 📙



Der CLM-Modus ist beendet, wenn die obige Anzeige erscheint. Betätigen Sie , um in den normalen Betriebsmodus zu wechseln.