

RESTAURATION & PROTHETIK



RESTAURATION & PROTHETIK

Create it 

NSK

INDEX

Turbineninstrumente	
Technologie & Funktion	03 - 04
Ti-Max Z	05 - 07
S-Max M	08
S-Max pico	09
Ti-Max X450	10
Pana-Max PLUS	11
Pana-Max2	12
NSK Kupplungen	13 - 14
Hand- & Winkelstücke	
Technologie & Funktion	15 - 16
Ti-Max Z	17 - 20
Ti-Max Z45L	21
Ti-Max nano	22
Ti-Max X	23 - 24
S-Max M	25
FX Serie	26
EX Serie / isoE-LUX	27 - 28
Mikromotoren	
NLX nano / NBX / M40 XS	29
Luftmotoren	30
Scaler	
Varios 970 / Ti-Max S970	31 - 32
Ersatzteile	33 - 34

NSK TECHNOLOGIE & FUNKTION

Push-Selbstspannfutter

Das Ultra-Push-System ist der original NSK Druckknopf-Selbstspannmechanismus, der während der Rotation den Bohrergrip anzieht. Es erlaubt einfachstes Einsetzen und Entnahme des Bohrers ohne Werkzeug. Mit zunehmender Belastung erhöht sich die Rückhaltekraft des Spannsystems.

Keramik-Kugellager

Kugellager aus Keramik sind 25% härter als herkömmliche Kugellager aus Stahl, wiegen aber nur rund die Hälfte. Die Abnutzung durch Friktion ist bei Keramikugellagern und den entsprechenden Kugellagerkäfigen deutlich vermindert, wodurch Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Turbinenläufer erhöht werden.

Autoklavierbar

Alle NSK Instrumente bieten auch bei häufiger Sterilisation Langlebigkeit und starke Leistung. Alle Instrumente können im Autoklaven bis 135° sterilisiert werden.

Thermodesinfizierbar

Zur verbesserten Infektionsvermeidung wird die Thermodesinfektion empfohlen. Entsprechend markierte NSK Instrumente können im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.

DURAGRIP

Bei gleicher Kratzfestigkeit wie bei der DURACOAT-Beschichtung bietet die DURAGRIP-Oberflächenbearbeitung einen noch besseren Grip für müheloses Halten.

DURACOAT

DURACOAT, die neueste NSK Technologie der Oberflächenveredelung, nutzt die antiallergenen und biokompatiblen Eigenschaften von Titan, um die Langlebigkeit zu verbessern und die Griffsicherheit zu erhöhen.

Mikrofilter

Der Mikrofilter mit 0,3 mm großen Öffnungen hält Partikel, die zur Blockade des Spraysystems führen könnten, aus diesem fern und stellt eine angemessene Kühlung sicher.

Zellglasoptik

Die NSK-Zellglasoptik überträgt brillante Beleuchtung, ist sehr langlebig und wird selbst durch wiederholtes Autoklavieren nicht beeinträchtigt.

Clean-Head-System

Das Clean-Head-System verfügt über einen Mechanismus, der das Rücksaugen von Blut, Mundflüssigkeiten und Fremdkörpern in den Instrumentenkopf verhindert. Neben den hygienischen Vorteilen, werden auch Kugellager und mechanische Bauteile vor diesen externen Einflüssen geschützt und bleiben länger haltbar.

Vierfach-Wasserstrahl

Der NSK Vierfach-Wasserstrahl ist einer der effektivsten seiner Art und sorgt für optimale Kühlung des gesamten Behandlungsfeldes.

Rücksaugstopp

Dieses Ventil verhindert zuverlässig das Eindringen von kontaminiertem Wasser in die Wasserleitungen.



Ti-Max Z Turbineninstrumente

Kraft in Ihren Händen.



Neu entwickelter 3D-Rotor


Der neue, dreidimensionale Rotor liefert ein beeindruckendes Drehmoment von 26W.



Neu entwickeltes Kugellager

Die neuen Kugellager sorgen für stabilen Lauf unter Höchst Drehzahlen und sind zweimal so haltbar wie ihre Vorgänger.

Ti-Max Z

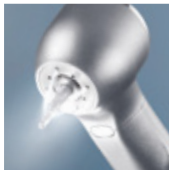

Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Zellglasoptik
Mikrofilter (Z800/Z900)
Quick-Stop-Funktion (Z micro)
Einfacher Rotorwechsel (Z micro)



Micro-Kopf
• Leistung : 20 W
• Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
• Kopfgröße : ø9,0 x H 10,8 mm
• Zur Verwendung mit Standardbohrern und Kurzschaftbohrern bis 21 mm Länge



Mini-Kopf
• Leistung : 23 W
• Geschwindigkeit : 360.000–440.000/min
• Kopfgröße : ø10,8 x H 12,1 mm



Standard-Kopf
• Leistung : 26 W
• Geschwindigkeit : 320.000–400.000/min
• Kopfgröße : ø12,5 x H 13,1 mm

NSK Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro	PA2357
Mini	●	Z800L	P1110
Standard	●	Z900L	P1111

KaVo® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro KL	PA2358
Mini	●	Z800KL	P1112
Standard	●	Z900KL	P1113

Dentsply Sirona® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Micro	●	Z micro SL	PA2359
Mini	●	Z800SL	P1114
Standard	●	Z900SL	P1115

W&H® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	Z800WL*	P1120
Standard	●	Z900WL*	P1121

*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	Z800BL*	P1116
Standard	●	Z900BL*	P1117

*Lichtquelle integriert

S-Max M



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Zellglasoptik
Einfacher Rotorwechsel



Mini-Kopf
• Leistung : 23 W
• Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
• Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm



Standard-Kopf
• Leistung : 26 W
• Geschwindigkeit : 325.000–430.000/min
• Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm

NSK Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800L	P1253
Mini	—	M800	P1255
Standard	●	M900L	P1254
Standard	—	M900	P1256

KaVo® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800KL	P1257
Standard	●	M900KL	P1258
Standard	—	M900K	P1259

Dentsply Sirona® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800SL	P1261
Standard	●	M900SL	P1262

W&H® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800WL*	P1265
Standard	●	M900WL*	P1266
Standard	—	M900W	P1287

*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	●	M800BL*	P1263
Standard	●	M900BL*	P1264

*Lichtquelle integriert

S-Max pico



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Einfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Zellglasoptik



- Leistung : 9 W
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
- Kopfgröße : ø8,6 x H 9,0 mm
- nur für Kurzschaft-/Ultrakurzschaft-Bohrer mit max. 18,5 mm Länge

NSK Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico	P1140

KaVo® Kupplungen


Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico KL	P1142

Dentsply Sirona® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico SL	P1143

Bohrersortiment

MODELL	BESTELLCODE
PC1 • Packung à 3 St.	Y1001817
PC2 • Packung à 3 St.	Y1001818
PC3 • Packung à 3 St.	Y1001819
PC3ff • extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002019
PC4 • Packung à 3 St.	Y1001820

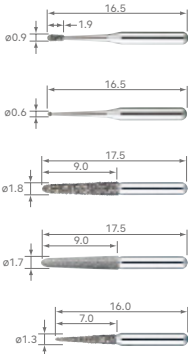

W&H® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico WLED*	P1145


*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S-Max pico BLED*	P1144

*Lichtquelle integriert

MODELL	BESTELLCODE
PC4ff • extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002020
PC5 • Packung à 3 St.	Y1001821
PC5ff • extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002021
PC6 • Packung à 3 St.	Y1001822
PC6ff • extrafeine Körnung • Packung à 3 St.	Y1002022

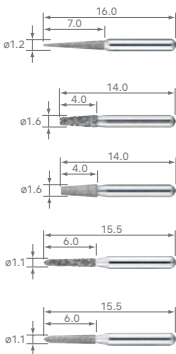

Ti-Max X450



Titankörper mit kratzfester
DURACOAT-Beschichtung
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Dreifach-Wasserstrahlkühlung
Clean-Head-System
Zellglasoptik



- Leistung : 21 W
- Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
- Kopfgröße : ø11.2 x H 13.5 mm
- 45°-Winkel-Kopf
- für FG-Bohrer mit max. 25 mm Länge

NSK Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450L	P1078

KaVo® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450KL	P1079

Dentsply Sirona® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450SL	P1080

W&H® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450WLED*	P1082

*Lichtquelle integriert

Bien Air® Kupplungen

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X450BLED*	P1081

*Lichtquelle integriert

Pana-Max PLUS



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Vierfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Rücksaugstopp
Ventil zur Regulation des
Luftdrucks



Mini-Kopf
• Geschwindigkeit : 380.000–450.000/min
• Kopfgröße : ø10,6 x H 12,4 mm



Standard-Kopf
• Geschwindigkeit : 340.000–410.000/min
• Kopfgröße : ø12,1 x H 13,3 mm

Pana-Max2



Edelstahlkörper
Keramik-Kugellager
Push-Selbstspannfutter
Einfach-Wasserstrahl
Clean-Head-System
Rücksaugstopp (M4/B2)
Ventil zur Regulation des
Luftdrucks (M4/B2)



• Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min
• Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm



• Geschwindigkeit : 350.000–450.000/min
• Kopfgröße : ø11,2 x H 13,4 mm

Midwest-4-Loch (Direktanschluss-Modelle) 			
Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	—	PAP-MU M4	P1021
Standard	—	PAP-SU M4	P1022

Borden-2-Loch (Direktanschluss-Modelle) 			
Kopf	Licht	MODELL	BESTELLCODE
Mini	—	PAP-MU B2	P1023
Standard	—	PAP-SU B2	P1024

NSK Kupplungen		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 PTL	P1211

KaVo® Kupplungen		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 KV	P1212

Midwest-4-Loch (Direktanschluss-Modelle) 		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 M4	P1154

Borden-2-Loch (Direktanschluss-Modelle) 		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	Pana-Max2 B2	P1155

NSK Kupplungen



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	PTL-CL-LED	P1001600

- massiver Titankörper • Rücksaugstopp • Für NSK
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	KCL-LED	P1005600

- massiver Titankörper • Rücksaugstopp
- Für KaVo® MULTIflex® LUX mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FM-CL-M4	P434051

- Edelstahlkörper • Rücksaugstopp • Für NSK



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	PTL-CL-LED III	P1001601

- massiver Titankörper • Rücksaugstopp
- Für NSK mit Wassermengenregler • LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	SCL-LED	P1009600

- massiver Titankörper • Rücksaugstopp
- Für Sirona® Quick Kupplung mit Wassermengenregler
- LED in Kupplung integriert



Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FM-CL-B2/3	P432051

- Edelstahlkörper • Rücksaugstopp • Für NSK

Turbinen-/Kupplungskompatibilität je Serie

	NSK (Mit Licht)	NSK (Ohne Licht)	KaVo® (Mit Licht)	KaVo® (Ohne Licht)	Dentsply Sirona®	W&H® (Mit Licht)	W&H® (Ohne Licht)	Bien Air®
Ti-Max Z	○	—	○	—	○	○	—	○
S-Max M	○	○	○	○ (M900K)	○	○	○ (M900W)	○
S-Max pico	○	—	○	—	○	○	—	○
Ti-Max X450	○	—	○	—	○	○	—	○
Pana-Max2	—	○	—	○	—	—	—	—
Kupplungstyp	 NSK Kupplungen (PTL Typ) LED		 KaVo® Multiflex® LED		 Sirona® Quick Kupplung LED	 W&H® Roto Quick®		 Bien Air® UNIFIX®

Hand- & Winkelstücke

NSK TECHNOLOGIE & FUNKTION

Anti-Erhitzungssystem

Das NSK-eigene Anti-Erhitzungssystem reduziert die Entwicklung von Hitze in signifikantem Umfang.

Push-Selbstspannfutter

Das Ultra-Push-System ist der original NSK Druckknopf-Selbstspannmechanismus, der während der Rotation die Haltekraft erhöht. Es erlaubt einfachstes Einsetzen und Entnahme des Bohrers ohne Werkzeug. Mit zunehmender Belastung erhöht sich die Haltekraft des Spannsystems.

Keramik-Kugellager

Kugellager aus Keramik sind 25% härter als herkömmliche Kugellager aus Stahl, wiegen aber nur rund die Hälfte. Die Abnutzung durch Friktion ist bei Keramik-Kugellagern und den entsprechenden Kugellagerkäfigen deutlich vermindert, wodurch Leistungsfähigkeit und Lebensdauer der Turbinenläufer erhöht werden.

Zellglasoptik

Die NSK-Zellglasoptik überträgt brillante Beleuchtung, ist sehr langlebig und wird selbst durch wiederholtes Autoklavieren nicht beeinträchtigt.

Clean-Head-System

Das Clean-Head-System verfügt über einen Mechanismus, der das Rücksaugen von Blut, Mundflüssigkeiten und Fremdkörpern in den Instrumentenkopf verhindert. Neben den hygienischen Vorteilen, werden auch Kugellager und mechanische Bauteile vor diesen externen Einflüssen geschützt und bleiben länger haltbar.

Vierfach-Wasserstrahl

Der NSK Vierfach-Wasserstrahl ist einer der effektivsten seiner Art und sorgt für optimale Kühlung des gesamten Behandlungsfeldes.

Autoklavierbar

Alle NSK Instrumente bieten auch bei häufiger Sterilisation Langlebigkeit und starke Leistung. Alle Instrumente können im Autoklaven bis 135° sterilisiert werden.

Thermodesinfizierbar

Zur verbesserten Infektionsvermeidung wird die Thermodesinfektion empfohlen. Entsprechend markierte NSK Instrumente können im Thermodesinfektor gereinigt und desinfiziert werden.

DURAGRIP

Bei gleicher Kratzfestigkeit wie bei der DURACOAT-Beschichtung bietet die DURAGRIP-Oberflächenbearbeitung einen noch besseren Grip für müheloses Halten.

DURACOAT

DURACOAT, die neueste NSK Technologie der Oberflächenveredelung, nutzt die antiallergenen und biokompatiblen Eigenschaften von Titan, um die Langlebigkeit zu verbessern und die Griffsicherheit zu erhöhen.

Mikrofilter

Der Mikrofilter mit 0,3 mm großen Öffnungen hält Partikel, die zur Blockade des Spraysystems führen könnten, aus diesem fern und stellt eine angemessene Kühlung sicher.

Höchste Laufruhe und minimale Vibration

Die Verwendung mikropräziser Teile und Getriebezähne reduziert Geräuscentwicklung und Vibration.

Rücksaugstopp

Dieses Ventil verhindert zuverlässig das Eindringen von kontaminiertem Wasser in die Wasserleitungen.



Ti-Max Z

Hand- & Winkelstücke

Komfort
in Ihren Händen.



Einfacher Zugang

Der verschlankte Körper des Handstücks ermöglicht selbst bei Behandlungen im molaren Bereich einen optimalen Zugang, ohne dabei mit den Frontzähnen in störenden Kontakt zu geraten.



Extrem geräusch- und vibrationsarm

Durch die perfekte Kombination von Komponenten und Getriebeteilen mit einer Abmessungspräzision im Mikrometerbereich wurden Betriebsgeräusche und Vibrationen auf ein beispielloses Minimum reduziert und dadurch eine sowohl für den Operateur als für den Patienten angenehme Behandlungsumgebung geschaffen.



Ti-Max Z



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	Z95L	C1034

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Sprayfunktion)
- Keramik-Kugellager • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System • Zellglasoptik

Zwei-Wege-Kühlfunktion



Wasserstrahlkühlung



Spraykühlung

Die weltweit erste Zwei-Wege-Kühlfunktion erlaubt es dem Anwender, spontan zwischen Spray- und Wasserstrahlkühlung auszuwählen - je nach dem, welche Bedingungen herrschen und welche Behandlung vorgenommen wird. Neben einer signifikanten Aerosol-Verringerung unterstützt die Wasserstrahlkühlung durch Verzicht auf den Luftanteil bei chirurgischer Anwendung die Vermeidung subkutaner Emphyseme, ohne Einschränkungen in der Kühlleistung zu erfordern. Sobald wieder mit Spraykühlung gearbeitet werden kann, kann der Drehschalter wieder entsprechend eingestellt werden. Ganz ohne Modifikation der Behandlungseinheit.

Spray-/Wasserstrahl Auswahlschalter



Sekundenschnelle Umstellung von Wasserstrahl (nur Wasser) auf Spray (Wasser und Sprayluft) und umgekehrt.



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	Z25L	C1038

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Sprayfunktion)
- Mikrofilter • Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	Z24L	C1126

- Mini-Kopf • max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	Z85L	C1062

- Mini-Kopf • max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)*
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Keramik-Kugellager
- Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem • Clean-Head-System • Zellglasoptik
- *für Kurzschaftbohrer



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	Z15L	C1039

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Sprayfunktion)*
- Mikrofilter • Clean-Head-System • Zellglasoptik



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:4,5-Übersetzung	●	Z84L	C1135

- Mini-Kopf • max. Geschwindigkeit: 180.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)*
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Sprayfunktion)
- Keramik-Kugellager • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System • Zellglasoptik • für Kurzschaftbohrer



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
16:1-Untersetzung	●	Z10L	C1040

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter
- Clean-Head-System • Zellglasoptik

Ti-Max Z45L




Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:4,2-Übersetzung	●	Z45L	C1064

- max. Geschwindigkeit: 168.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm) • 45°-Winkel-Kopf
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Keramik-Kugellager • Push-Selbstspannfutter
- Vierfach-Wasserstrahl (Zwei-Wege-Sprayfunktion) • Mikrofilter
- Anti-Erhitzungssystem • Clean-Head-System • Zellglasoptik

Verbesserter Zugang

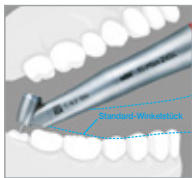


Der um 45 Grad abgewinkelte Kopf erleichtert den Zugang zum molaren Bereich, ohne dass das Instrument mit Frontzähnen oder angrenzenden Molaren in Konflikt gerät.

Zwei-Wege-Sprayfunktion



Wasserstrahl

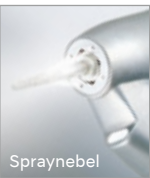

Spraynebel

Die weltweit erste Zwei-Wege-Sprayregulierung ermöglicht die Umschaltung zwischen Spraynebel und Wasserstrahl, je nach Behandlungssituation und -verfahren. Der Wasserstrahl verhindert subkutane Emphyseme bei chirurgischen Verfahren, während der Spraynebel das Werkzeug wirksam kühlt.

Optimaler Zugang in unterschiedlichsten klinischen Situationen

Sektionieren eines impaktierten Weisheitszahnes (38)



Durch das schlanke Design des Ti-Max Z45L entsteht im Frontzahnbereich genügend Platz, damit die Finger für ein bequemes und stressfreies Arbeiten abgestützt werden können. Der Bohrer kann im optimalen Winkel geführt werden, sodass auch bei maximaler Arbeitstiefe im Apexbereich präzises Sektionieren sichergestellt ist.

Zervikale Kariesentfernung bei einem linken oberen Schneidezahn (22)



Die sichere Fingerauflage auf einem Frontzahn ermöglicht stabiles Beschleifen ohne Störung durch andere Zähne. Da der Winkel des Bohrers frei kontrollierbar ist, sind auch minimal invasive Interventionen möglich.

Palatinale Kariesentfernung an einem linken zweiten Prämolaren im Oberkiefer (25)



Beim Arbeiten auf der Gaumenseite eines zweiten Prämolaren ermöglicht Ti-Max Z45L behutsames Behandeln und gewährleistet ausreichenden Arbeitsraum zu den angrenzenden Backenzähnen des Oberkiefers.

Freilegung der Pulpenkammer an einem zweiten rechten Prämolaren im Unterkiefer (45)



Ti-Max Z45L ermöglicht reibungslose Präparation, ohne durch die Kofferdamklammer gestört zu werden. Seine Flexibilität macht Behandlungen sicherer und präziser.

Ti-Max nano



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	nano95LS	C1099

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Vierfach-Wasserstrahl
- Keramik-Kugellager • Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem
- Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	nano25LS	C1100

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter
- Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	nano15LS	C1101

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter
- Clean-Head-System • Zellglasoptik

Gerades Handstück

Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	nano65LS	H1048

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
- Titankörper mit kratzfester DURAGRIP-Beschichtung • Einfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System • Zellglasoptik * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper



Ti-Max X



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	X95L	C600
1:5-Übersetzung	—	X95	C610

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Keramik-Kugellager • Vierfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter • Anti-Erhitzungssystem • Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	X25L	C601
1:1-Übertragung	—	X25	C611

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter
- Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	X15L	C602
4:1-Untersetzung	—	X15	C612

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter
- Clean-Head-System • Zellglasoptik



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	—	X95EX	C1072

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Keramik-Kugellager • Vierfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
10:1-Untersetzung	●	X12L	C606
10:1-Untersetzung	—	X12	C616

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl
- Mikrofilter • Clean-Head-System • Zellglasoptik



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
10:1-Untersetzung	●	X35L	C620
10:1-Untersetzung	—	X35	C624

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min • 60° Vorwärts-/Rückwärtsdrehung
- für Handfeilen und Feilen mit Winkelstückschaft
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter • Zellglasoptik



MODELL	BESTELLCODE
QF Adapter	C877701



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
16:1-Untersetzung	●	X57L	C609
16:1-Untersetzung	—	X57	C619

- max. Geschwindigkeit: 2.500/min • für Schraubkelche und -bürsten
- Spezielles Dichtsystem verhindert den Eintritt von Polierpaste
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Drehung um 360° • ohne Spraykühlung • Zellglasoptik



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	X55L	C608
4:1-Untersetzung	—	X55	C618

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min • für EVA- und Profin-Spitzen / Kieferorthopädische Feile (Schaft ø2,36-2,40 mm)*
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Einfach-Wasserstrahl • Mikrofilter • Zellglasoptik
- LTA-Profin-Aufsätze nicht im Set enthalten • Einrast-Spannfutter
- *Die Verwendung von Feilen mit Metallschaft ist nicht möglich.

Gerades Handstück



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	X65L	H273
1:1-Übertragung	—	X65	H274

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)*
- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Einfach-Wasserstrahl • Clean-Head-System • Zellglasoptik
- * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

S-Max M



Vierfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:5-Übersetzung	●	M95L	C1023
1:5-Übersetzung	—	M95	C1026

- max. Geschwindigkeit: 200.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm) • Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter • Keramik-Kugellager • Vierfach-Wasserstrahl
- Clean-Head-System • Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	●	M25L	C1024
1:1-Übertragung	—	M25	C1027

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Clean-Head-System
- Zellglasoptik



Einfach-Wasserstrahl



Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	●	M15L	C1025
4:1-Untersetzung	—	M15	C1028

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Edelstahlkörper
- Push-Selbstspannfutter • Einfach-Wasserstrahl • Clean-Head-System
- Zellglasoptik



Gerades Handstück			
Übersetzungsverhältnis	Licht	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	—	M65	H1008

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)* • Edelstahlkörper
- Einfach-Wasserstrahl • Clean-Head-System
- * (nur) mit eingesetztem Bohrerstopper

FX Serie



Winkelstücke mit externer Wasserzufuhr*		
Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	FX25m	C1052

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Edelstahlkörper
- Kugellager • Push-Selbstspannfutter • Clean-Head-System



Winkelstücke mit externer Wasserzufuhr*		
Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	FX15m	C1053

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm) • Edelstahlkörper
- Kugellager • Push-Selbstspannfutter • Clean-Head-System



Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
16:1-Untersetzung	FX75m	C1055

- Mini-Kopf • max. Geschwindigkeit: 1.250/min • für maschinelle Feilen
- Edelstahlkörper • Drehung um 360° • Push-Selbstspannfutter



Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	FX57m	C1054

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min
- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben • Edelstahlkörper
- Drehung um 360° • Pastensiegel-Dichtsystem • ohne Spraykühlung



Gerades Handstück		
Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	FX65m	H1014

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Edelstahlkörper • Clean-Head-System

EX Serie

Winkelstückköpfe für allgemeine Anwendungen mit externer Wasserzufuhr*

MODELL	BESTELLCODE
FPB-Y	C875

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- Kugellager



MODELL	BESTELLCODE
NAC-Y	C032002

- max. Geschwindigkeit: 30.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss



MODELL	BESTELLCODE
BB-Y	C037

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellager



MODELL	BESTELLCODE
NBBW-Y	C211

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Schnappverschluss • Kugellager
- mit seitlicher Wassersprühdüse



MODELL	BESTELLCODE
NM-Y	C247

- max. Geschwindigkeit: 30.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Mini-Kopf • Schnappverschluss



MODELL	BESTELLCODE
FFB-Y	C884

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit FG-Schaft (ø1,6 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
NRS2-Y	C549

- max. Geschwindigkeit: 3.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit CA-Schaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System • Push-Selbstspannfutter
- 10:1-Untersetzung



Winkelstückköpfe für Prophylaxe

MODELL	BESTELLCODE
AR-Y (S)	C187

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min
- für Kelche und Bürstchen zum Einschrauben



MODELL	BESTELLCODE
AR-Y (K)	C188

- max. Geschwindigkeit: 5.000/min
- für Kelche mit Einrastmechanismus



MODELL	BESTELLCODE
EVA-Y	C235

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Eva-Interdental-Spitzen
- Auf- und Abbewegung Hub 1,4 mm



Winkelstückköpfe für Endodontie

MODELL	BESTELLCODE
MP-Y	C547

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min • Mini-Kopf
- Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
MPA-Y	C548

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min • Mini-Kopf
- Anschluss für Apexlokalisator (für langen Schaft)
- Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
MPAS-Y	C882

- max. Geschwindigkeit: 20.000/min • Mini-Kopf
- Anschluss für Apexlokalisator (für kurzen Schaft)
- Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
TEQ-Y	C849

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min
- 80°-Drehbewegung vor und zurück
- für maschinelle Feilen (ø2,35 mm)
- Push-Selbstspannfutter



MODELL	BESTELLCODE
TEP-Y	C837

- max. Geschwindigkeit: 4.000/min
- 60°-Drehbewegung vor und zurück
- für Handfeilen • Push-Selbstspannfutter



Unterteile

MODELL	BESTELLCODE
EC	C100008
ECM	C100007

- 1:1-Übertragung



MODELL	BESTELLCODE
ER4	C634
ER4M	C634002

- 4:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER10	C635

- 10:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER16	C636

- 16:1-Untersetzung



MODELL	BESTELLCODE
ER64	C637

- 64:1-Untersetzung



Gerades Handstück



Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
1:1-Übertragung	EX-6B	H260001

- max. Geschwindigkeit: 40.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System



Übersetzungsverhältnis	MODELL	BESTELLCODE
4:1-Untersetzung	EX-5B	H262

- max. Geschwindigkeit: 10.000/min
- für Schleifwerkzeuge mit HP-Handstückschaft (ø2,35 mm)
- Clean-Head-System



MODELL	BESTELLCODE
Sprayclip	H019711

- für EX-6B, EX-5B (optional)

isoE-LUX Lichtsonde



Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	isoE-LUX	Z1265

- E-Typ Optik Motoranschluss • Edelstahlkörper
- Zellglasoptik

■ Unterteile und Köpfe sind separat erhältlich, sodass diese je nach Indikation oder persönlicher Vorliebe kombiniert werden können.

*Bitte beachten Sie die Sprayclips für die EX-Serie im Kapitel "Ersatzteile"



Waschbar im Thermodesinfektor (außer: NAC-Y, BB-Y, NBBW-Y, NM-Y, TEQ-Y, EC, ER4, ER10, ER16, ER64, EX-6B, EX-5B)



Autoklavierbar

Elektrische Mikromotoren

NLX nano Elektrischer Mikromotor, portables System

Geschwindigkeit : 2.000 – 40.000/min, Drehmoment : 3,4 Ncm

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	NLX nano S230 (230 V)	Y1001362

Inhalt
• Steuergerät • Mikromotor • Kabel • Wechselstromadapter 230 V

Technische Daten
[Steuergerät] [Mikromotor](ohne Schlauch)
• Nennleistung : Wechselstrom 28 V 50/60 Hz • Abmessungen : ø22 x L 70 mm
• Abmessungen : B 127 x T 149 x H 54 mm • Gewicht : 61 g
• Gewicht : 517 g



NBX Ultrakompakter LED-Mikromotor

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	NBX	E1059051
—	NBX N	E1074051

• Max. 40.000/min • nur Mikromotor (ohne Schlauch)
• LED-Lichtquelle (nur NBX MIT LICHT)
• Ultrakompakt und leichter, massiver Titankörper

Motorschlauch		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	NBX CDB	E1059061
—	NBX N CDB	E1074061

• Weitere Motorschläuche für Sirona®, KaVo®, etc. auf Anfrage erhältlich



M40 XS Direkter Anschluss an Bien Air® 4VLM und 4VR 400 Schläuche

Interne Wasserzufuhr		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	M40 XS	E1135051
—	M40N XS	E1136051

• ruhiger, sanfter Lauf von 60 bis 40.000/min
• kompakter, leichter kernloser Mikromotor
• Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
• LED-Lichtquelle (M40 XS)

NSK Motorschlauch		
Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	M40-CD	S900100

• Weitere Motorschläuche für Sirona®, KaVo®, etc. auf Anfrage erhältlich.



Luftmotoren

Ti-Max X205L

Interne Wasserzufuhr

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	X205L	M1013

• max. Geschwindigkeit: 23.000/min ±10%
• 360-Grad-Drehgelenk mit Licht • 32.000 LUX
• Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung • Rücksaugstopp



DynaLED M205LG

Interne Wasserzufuhr

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	M205LG M4	M1018
●	M205LG B2	M1019

• max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10% (M4),
max. Geschwindigkeit: 25.000/min ±10% (B2)
• Midwest-4-Loch / Borden-2-Loch • 25.000 LUX
• LED Luft-Motor mit Micro Power Generator • Rücksaugstopp



S-Max M205

Interne Wasserzufuhr

Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	M205	M1007

• max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10% • Midwest-4-Loch
• Edelstahlkörper • Rücksaugstopp



FX205m

Externe Wasserzufuhr

Licht	MODELL	BESTELLCODE
—	FX205m M4	M1005001
—	FX205m B2	M1006001

• max. Geschwindigkeit: 22.000/min ±10% (M4),
max. Geschwindigkeit: 25.000/min ±10% (B2)
• Midwest-4-Loch / Borden-2-Loch • Edelstahlkörper



Ultraschallscaler

Varios 970

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	VA970 LUX 230V S1	Y1004161
—	VA970 230V S1	Y1004160

- Inhalt**
- Steuergerät
 - Handstück
 - Handstückkabel
 - 3 Scaler-Aufsätze (G4, G8, G16)
 - Fußschalter (FC-70)
 - 2 x Kühlmittelflaschen
 - 3 x Drehmomentschlüssel
 - Wechselstromkabel
 - Sterilisationskassette



Airscaler

Ti-Max S970

Licht	MODELL	BESTELLCODE
●	S970L	T1005
—	S970	T1020

- Titankörper mit kratzfester DURACOAT-Beschichtung
- Zellglasoptik
- 3 Stufen Power Ring
- inkl. 3 Prophylaxe-Aufsätze (S1, S2 & S3), Drehmomentschlüssel (CR-20) und Aufsatzschutz (L)



Restaurativ minimal-invasive Präparation

MODELL	BESTELLCODE
G61D	Z217601

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
G62D	Z217602

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
G65D	Z217605

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
G66D	Z217606

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
G67D	Z217607

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
G68D	Z217608

- Diamant-Beschichtung



Kondensieren

MODELL	BESTELLCODE
G21	Z217010

- keine Kühlung erforderlich
- für Frontzähne • einschl. 3 Kappchen



MODELL	BESTELLCODE
G22	Z217020

- keine Kühlung erforderlich
- für Seitenzähne • einschl. 3 Kappchen



Kronenentfernung / Verschluss

MODELL	BESTELLCODE
G26	Z217206

- Kronenentfernung



MODELL	BESTELLCODE
G28	Z217208

- keine Kühlung erforderlich
- Amalgamkondensation



V-Aufsatz System

MODELL	BESTELLCODE
V30	Z217030

- beinhaltet Schlüssel zum Wechseln der Aufsätze
- V-Aufsatz-Halter • Aufsatz optional



Restaurativ (V-Aufsatz) minimal-invasive Präparation

MODELL	BESTELLCODE
V-G70	Y900118

- Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.



V-G71	Y900119
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.	



V-G72	Y900120
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.	



V-G75	Y900121
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.	



V-G76	Y900122
• Diamant-Beschichtung • Packung à 3 St.	



Finieren / Trimmen / Polieren

MODELL	BESTELLCODE
V-G77	Y900165

- Diamant-Beschichtung
- Normale Körnung • Packung à 3 St.



V-G78	Y900166
• Diamant-Beschichtung	
• Feine Körnung • Packung à 3 St.	



V-G79	Y900167
• Diamant-Beschichtung	
• Superfeine Körnung • Packung à 3 St.	



Kariesexkavation

MODELL	BESTELLCODE
V-S1	Y900161

- Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.



V-S3	Y900162
• Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.	



V-S33	Y900163
• Aufsatz Edelstahl • Packung à 3 St.	



Restaurativ minimal-invasive Präparation

MODELL	BESTELLCODE
S65D	Z252465

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S66D	Z252466

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S67D	Z252467

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S68D	Z252468

- Diamant-Beschichtung



Restaurativ Kronenrandpräparation

MODELL	BESTELLCODE
S81D	Z252469

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S82D	Z252462

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S83D	Z252461

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S86D	Z252460

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S71D	Z252471

- Diamant-Beschichtung



MODELL	BESTELLCODE
S72D	Z252472

- Diamant-Beschichtung



Ersatzteile

Ti-Max Z Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX3-NU03 Einsatz für Z micro		PA2307X001
TiZ-MU03 Einsatz für Z800		Y1002075
TiZ-SU03 Einsatz für Z900		Y1002076
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-NU04 Kopfdeckel für Z micro		PA2307X050
TiZ-MU04 Kopfdeckel für Z800		P1051050
TiZ-SU04 Kopfdeckel für Z900		P1052050
SX-NU05 Kopfdeckelschlüssel für Z micro		PA2307X765

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiZ-MU05 Kopfdeckelschlüssel für Z800		Z265006
TiZ-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Z900		Z265007
Reinigungsdraht		Z144101
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791

S-Max M Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU04 Kopfdeckel für M500 / M800		P1001500
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für M900		P1027500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535
Ersatz-LED für WLED und BLED		10001791

S-Max pico Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-PU03 Einsatz für S-Max pico		P1140200
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-PU04 Kopfdeckel für S-Max pico		P1140500
SX-PU05 Kopfdeckelschlüssel für S-Max pico		20002803

Ti-Max X450 Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiX45-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		Y1001906
PTL O-Ring Set (5er-Set O-Ringe)		Y900580

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TiX45-SU04 Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1078500
Kopfdeckel - schlüssel X450		P624765

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Ersatz-LED Kopfdeckel für Standard-Kopf		10001791

Pana-Max PLUS Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU03 Einsatz für Mini-Kopf		P1280
SX-SU03 Einsatz für Standard-Kopf		P1281

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-MU04 Kopfdeckel für Mini-Kopf		P1001500
SX-SU04 (YOS) Kopfdeckel für Standard-Kopf		P1027500

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
SX-SU05 Kopfdeckelschlüssel für Mini- und Standard-Kopf		20000535

Pana-Max2 Turbinen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU03 Einsatz		P1190

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU04 Kopfdeckel		P1190050

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
PAX2-SU05		P1190765

Kupplungen

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
TA Lampe für KCL-6 (3er-Packung)		Y900132
PTL-Lampe für PTL (3er-Packung)		Y900529

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
O-Ring-Set für KCL-6/LED		Y900211
O-Ring-Set für SCL-LED		S900060

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Ersatz-LED für KCL / SCL / PTL		10000198

FX Serie

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
FX25-04 Kopfdeckel für FX25m		C1052500
FX25-03 Einsatz für FX25m		C1052700

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Sprayclip für FX25m/FX15m		C1052702
Sprayclip für FX65m		H019711

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Schlüssel für FX25m		C1052701
Schlauch		Z166101

EX Serie

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
FPB-03 Einsatz für FPB-Modelle		C875060
NAC-03 Einsatz für NAC-Modelle		C030011

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Sprayclip für NAC, BB, FPB, FFB, TEP		C032701
Sprayclip für EX-5B, EX-6B		H019711

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Kopfdeckelschlüssel für AR-Y(S)		C185751
Kopfdeckelschlüssel (schwarz)		C071751

BB-03 Einsatz für BB-Modelle		C037015
NBB-03 Einsatz für NBB/NBBW-Modelle		C210015

FPB-02 mittleres Getriebe für FPB-Y		C875012
NAC-02 mittleres Getriebe für NAC-Y		C032012

Schlauch		Z166101
-----------------	---	----------------

Ti-Max X95EX

MODELL	PRODUKT	BESTELLCODE
Schlauch		Z166101

KaVo und Multiflex sind eingetragene Warenzeichen der KaVo Dental GmbH.
Dentsply Sirona und Sirona sind eingetragene Warenzeichen der Dentsply Sirona Inc.
W&H und Roto Quick sind eingetragene Warenzeichen der W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH.
Bien Air und UNIFIX sind eingetragene Warenzeichen der Bien-Air Holding SA.

Satelec ist ein eingetragenes Warenzeichen von Satalec, eine Firma der Acteon Gruppe.
EMS ist ein eingetragenes Warenzeichen der Ferton Holding SA.